

Q&A よくあるご質問

Q. SalivaChecker®は定期的に受けたほうが良いですか？

また、SalivaChecker®を受ければ他のがん検診は受けなくても大丈夫ですか？

A. 本検査はだ液を採取した時点でがんの疑いがあるかどうかを調べる検査です。生涯にわたってのリスクを予測するものではありませんので、定期的に受けていただくことをお勧めします。また、各検査には長所と短所があり、互いに補いあっています。SalivaChecker®と他の検査を併せて受けると、がんを見つけ出せる可能性は高くなります。

Q. SalivaChecker®は遺伝子検査ですか？

A. 本検査は、遺伝子検査でがんになりやすい体質かを調べるものではなく、検査を受けた時点でがんの疑いがあるかどうかを調べる検査です。そのため、生涯に一度きりではなく、定期的に受けていただくことをお勧めします。

Q. SalivaChecker®は必ずがんを発見できるのですか？

A. 本検査は、がんを診断するためのものではなく、現在がんの疑いがあるかどうかを調べる検査です。高いリスク値が出てがんの発見につながる場合もある一方で、リスク値が低い場合でもがんがある可能性もあります。必ずがんを発見できるというものではありません。リスク値が高い場合には、検査を受けた医療機関または検査後の相談ができる医療機関にご相談いただくことをお勧めします。

Q. SalivaChecker®は他のがん検診と比べてどんな特長がありますか？

A. 本検査は、少量のだ液を採取するだけで、複数の種類のがんのリスクを調べることができます。

Q. SalivaChecker®は保険診療で受けられますか？

A. 本検査は最先端技術を用いた新しい検査法のため、健康保険診療は適用されません。自由診療となりますので、検査料は検査を受ける方の全額負担となります。検査料は医療機関へお問い合わせください。

Q. SalivaChecker®を受けるにはどうすれば良いですか？

A. 医療機関へ直接お申し込みください。検査を受けられる医療機関はサリバテックのWebサイトに掲載しています。

サリバテック 医療機関 検 索

Q. SalivaChecker®は今までにがんになったことがある人や現在治療中の人でも受けられますか？

A. 本検査を受けることはできますが、体内に強い炎症があるとリスク値が高く出る可能性があります。

▶ その他Q&AはWebサイトをご覧ください。

■お問い合わせ サリバテックのWEBサイトから、検査についてのよくあるご質問をご覧ください。

<https://www.salivatech.co.jp/inquiry-faq>

ご不明な点やご質問がございましたら検査提供元または下記にお問い合わせください。

〈検査キット開発元／検査・測定機関〉

株式会社サリバテック

〒997-0052 山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

鶴岡メタボルームキャンパス内

E-mail info@salivatech.co.jp

URL <https://www.salivatech.co.jp/>



検査医療機関

SalivaChecker®

サリバチェッカー®

だ液による
がんリスク検査のご案内




SalivaTech

SalivaChecker®（サリバチェッカー®）とは？

だ液は「身体の鏡」といわれ、血液や尿と同じように健康状態の指標となる多くの情報を含みます。だ液中の成分の大部分は血液由来のため、がん細胞からしみ出す代謝物質は血管を通り、だ液中にしみ出します。


SalivaChecker®は、最新の測定装置を用いてこれらの物質の濃度を解析することで、がんのリスクを調べます。

人間のだ液には、安静時だ液・刺激性だ液の2種類があります。SalivaChecker®は血液成分に近いといわれる「安静時だ液」を用いて検査を行っています。

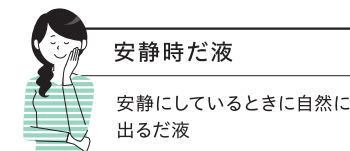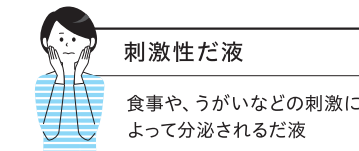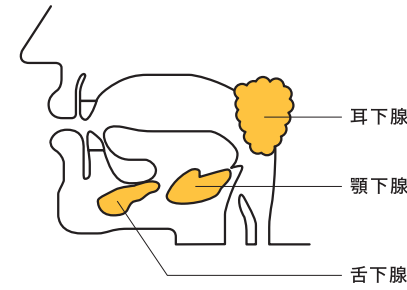


だ液の分泌量



1日に1～1.5L
安静時 毎分0.3～0.4ml
刺激時 毎分1～2ml

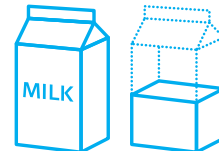


SalivaChecker®の特長は？

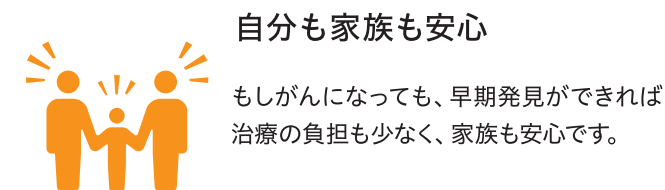


1度に複数のがんのリスクがわかる

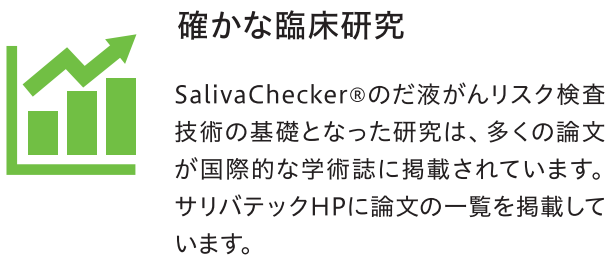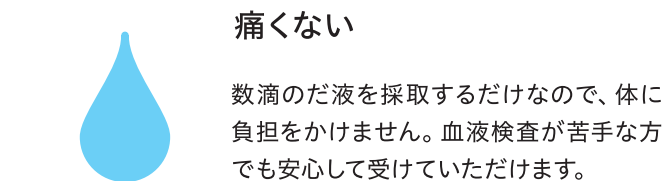

だ液採取の方法

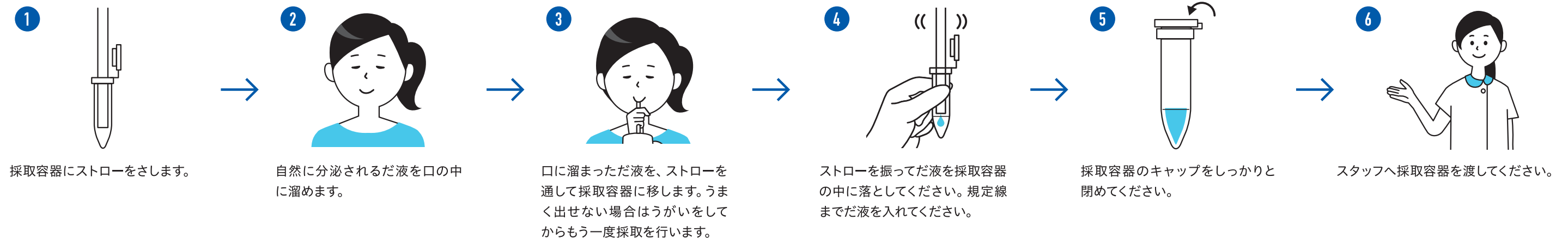

SalivaChecker®の流れ

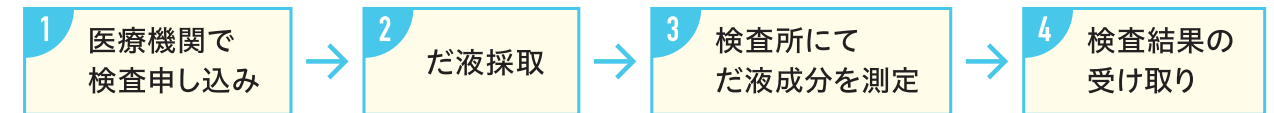

検査実施日より約3週間で医療機関へ結果を提供します。検査を受診された方へお渡しするまでの期間は各施設ごとに異なります。結果をご覧になって、がんのリスク値が高い場合は、検査を受けた医療機関に相談されることをお勧めします。リスク値が低い場合でも、定期的にSalivaChecker®を受診することをお勧めします。

だ液採取前の注意事項

だ液は午前中に採取してください。

※下記注意事項を遵守できなかった場合、正確な検査結果が得られない可能性があります。

検査方法を
動画でチェック！

